


Ortesis AFO Ponseti

Tratamiento pie zambo

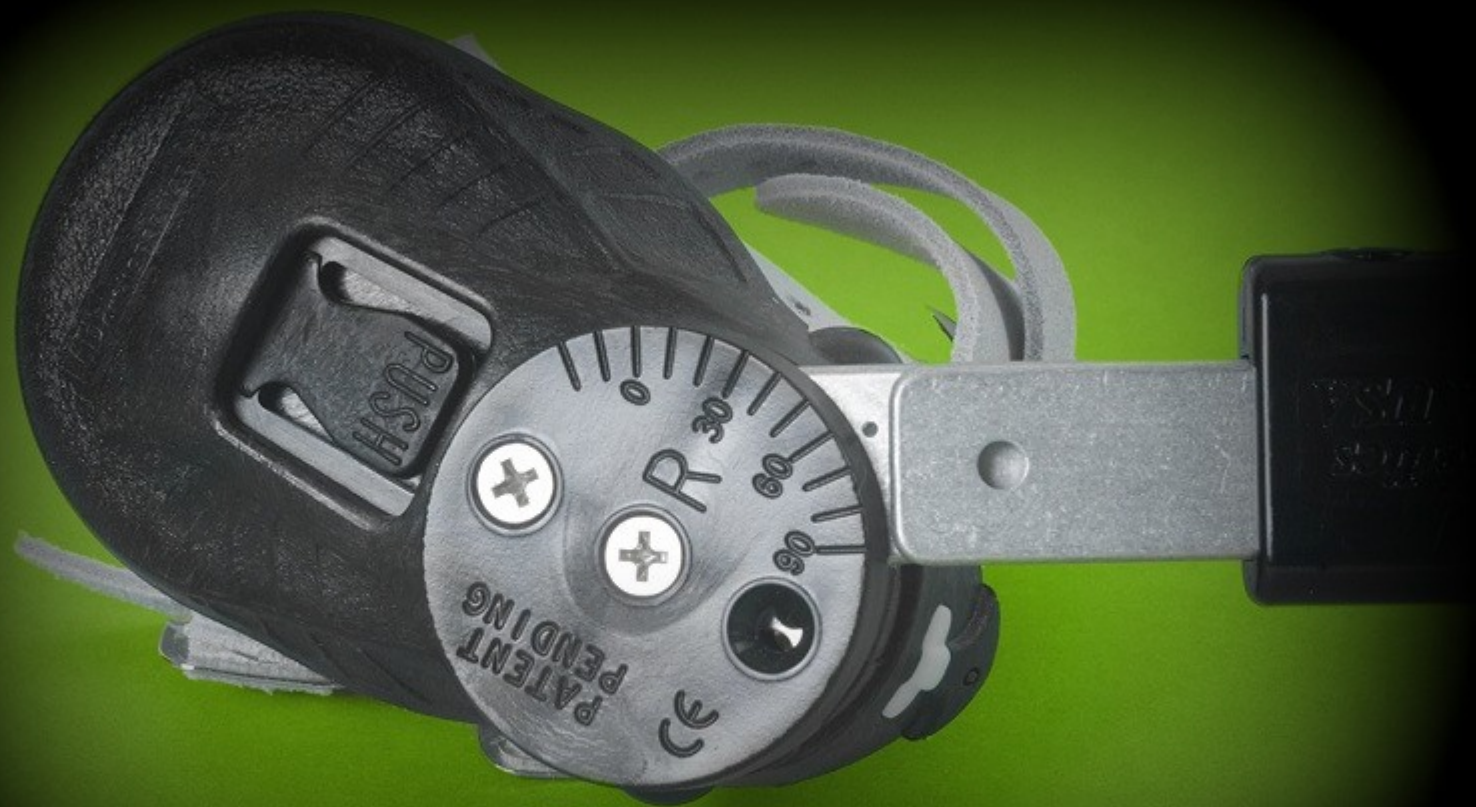

Tallas de sandalia					
talla	largo (cm)	ancho (cm)	PO-PB002	PO-PB004	PO-PB006
Bebe prematuro	6,5	2,5-4,0	*		
Prematuro 2	6,9	3,0-4,5	*		
0000	7,3	3,3-4,8	*		
000	7,8	3,0-5,5	*		
00	8,3	3,0-5,5	*		
0	9,0	3,0-6,0	*	*	
1	9,5	3,5-6,0	*	*	
2	10,5	3,8-6,5	*	*	*
3	11,5	4,5-7,0	*	*	*
4	12,5	4,7-7,0	*	*	*
5	13,5	4,8-7,0	*	*	*
6	14,5	5,0-7,5	*	*	*
7	15,5	5,5-8,0	*	*	*
8	16,5	6,7-8,2	*	*	*
9	17,5	7,0-8,5	*	*	
10	18,5	7,4-8,9	*	*	
11	19,5	7,7-9,2	*	*	
12	20,5	8,0-9,5	*	*	

Tamaños de las barras	
talla	largo (cm)
Bebe prematuro	Con sandalias Se puede doblar fácilmente a la longitud deseada. Sandalia de 6,5 cm.
Prematuro 2	Con sandalias Se puede doblar fácilmente a la longitud deseada. Sandalia de 6,9 cm.
Extra corto	17,3 - 25
Corto	20 - 30
Largo	23,5 - 37,8
X-largo - libre	22,5 - 31 Se recomienda solo su uso con PO-PB006

(*) tallas disponibles para cada modelo

Las medidas de la tabla se refieren al tamaño del zapato, no del pie.

La longitud del pie se mide desde la parte posterior del talón al extremo del Hallux (dedo gordo).

Se aconseja utilizar siempre una talla de sandalia superior a la medida.

Por ejemplo para un pie de 9 cm, aconsejamos una talla 1.

ortesis Ponseti con sandalia y barra

Calzado tipo sandalia unido por una barra ajustable en longitud. El ángulo de la sandalia puede ajustarse fácilmente. La evolución de la rigidez del pie se puede observar semanalmente desde los dos agujeros que la sandalia tiene en la parte posterior.

Las sandalias se unen a la barra mediante un sencillo sistema de "clip". El calzado se compone de una base en caucho bien moldeada y correas en cuero, que consiguen que el pie esté bien sujeto a su base evitando su deslizamiento: Normalmente el bebé no necesita ningún periodo de ajuste, tolerando perfectamente el calzado.

Los zapatos están disponibles en una gama de tamaños, y siempre deben de ser usados con calcetines, para evitar llagas o ampollas.

Existe un modelo para bebés prematuros en la que las sandalias van unidas a la barra.

Las sandalias siempre se deben pedir siempre por pares y pueden ser de diferentes tamaños el derecho y el izquierdo.



referencia	
PO-PB003	sandalias con barras (ortesis completa)
PO-PB001	barra con rotación y abducción (cinco tamaños)
PO-PB002	sandalias (par) dieciocho tamaños
PO-MSP001	acolchado especial empeine



ortesis Ponseti con cuña anterior

Modelo de sandalia con cuña anterior, que se puede utilizar bien con barras o bien sin barras durante periodos cortos para ayudar a mantener al bebé una buena flexión dorsal, asegurando el estiramiento del tendón de Aquiles y ayudando a mantener un pie flexible. Cuando se utiliza sin barras, el bebé debe poder mantenerse en pie, caminar y la ortesis nos garantizará diez grados de flexión dorsal.



referencia	
PO-PB007	sandalias con plataforma anterior con barras (ortesis completa)
PO-PB001	barra con rotación y abducción (cinco tamaños)
PO-PB006	sandalias (par) dieciocho tamaños
PO-MSP001	acolchado especial empeine



ortesis Ponseti con resistencia a la flexión plantar

Modelo de zapato que nos permite mantener siempre el pie del bebé en una posición neutra, o bien en dorsiflexión. Es conveniente también en los bebés con hiperflexibilidad del pie, ya que nos garantiza una posición correcta.

Se utilizan siempre con las barras PO-PB001 para conseguir la abducción necesaria.

Este calzado al igual que todos los de este programa no contienen latex de caucho, y está fabricado con materiales elastómeros termoplásticos hipoalergicos.



referencia	
PO-PB005	sandalias con resistencia a la flexión plantar con barras (ortesis completa)
PO-PB001	barra con rotación y abducción (cinco tamaños)
PO-PB004	sandalias (par) dieciocho tamaños
PO-MSP001	acolchado especial empeine

material didáctico



Modelo de pie zambo, fabricado en material plástico y con filamentos elásticos que representan los ligamentos. Ideal para explicar y mostrar las diferentes fases necesarias en la manipulación de un pie zambo.

referencia	
PO-PCM001	Modelo esqueleto pie

Muestra la zona de aplicación en una intervención quirúrgica en una tenotomía, reproduciendo los vasos sanguíneos próximos al tendón. El modelo también permite mostrar el mecanismo de dorsiflexión producido después de la intervención.

referencia	
PO-TEN001	Modelo tenotomía



material didáctico

Modelos de piernas de bebé fabricadas con goma muy resistente, pensadas para la demostración y el ensayo de la buena manipulación de un pie zambo, existen tres modelos.

Posición 1: representa un pie zambo sin tratar. Se puede ver la posición del astrálogo y corregirlo adecuadamente.

Posición 2: representa un pie zambo corregido parcialmente. La incorrecta posición del astrálogo no está tan pronunciada como la anterior, y se aprecia una parcial abducción del pie.

Posición 3: representa un pie zambo en el que su posición se ha corregido, aunque debe mejorarse la abducción del pie



referencia	
PO-PRL001	Modelo posición 1
PO-PRL002	Modelo posición 2
PO-PRL003	Modelo posición 3
PO-PRL004	Set del conjunto de tres modelos

Muestra la serie de etapas de un enyesado, siguiendo el método Ponseti, pudiendo ser fijado en una pared.

referencia	
PO-PPC001	Modelo enyesado





parque tecnologico asturias parc. 1

33428 Llanera

Principado de Asturias

tfno.: 985 794800

fax: 985 794810

mail: welcome@ortoiberica.es